

# 登全醫事檢驗所通告

公告編碼：103009

公告日期：103年8月25日

公告事項：HbA1c 更換儀器分析方法；檢體採集注意事項。

1.HbA1c自103年9月1日起更換分析儀器方法，參考區間如下：

檢驗項目：Glycohemoglobin，Glycosylated hemoglobin，Hb A1c

健保編號：09006C 醣化血紅素

健保點數：200

自費收費：300

檢體採集：新鮮全血 1.0 mL，含 Heparin，NaF，Sodium citrate & EDTA，病人不需空腹。  
全血檢體不能溶血，保存方式：2-8°C。

報告時效：每天

分析方法：ARKRAY ADAMS A1c HA-8180V

參考區間：4.0-6.1 % of Hb

2.近來檢體異常頻率及資料錯誤偏高，再次提醒各單位配合以下幾點：

- (1).送檢單為檢驗依據請各單位務必填寫(有處方籤者可免填寫)。**送檢單務必填寫清楚，字跡勿潦草，勾選項目亦需清楚**，以免資料輸入錯誤。
- (2).依據檢驗項目**使用正確試管**，避免檢體錯誤無法檢測，延誤報告且浪費資源，如果對試管種類有疑問請來電詢問。
- (3).檢體採集後，檢體上務必**標示姓名資料**，開蓋分裝檢體後務必**正確蓋回蓋子**，**壓好或旋緊蓋子**，以免汙染檢體甚至因未蓋好而導致漏光。**(紫頭管含有 K，切忌與生化管混合)**；含有抗凝劑試管請**混合均勻**，避免檢體凝固無法上機，延誤報告。
- (4).檢體量務必達到需求量(3 - 8 mL 生化管)，不可過少，勉強上機可能造成報告誤差；同時足量也方便加驗或 check。
- (5).一般細菌培養請使用黑頭棉棒(含培養基)，**GBS 請使用藍頭棉棒專用管**。

謹此告知

登全醫事檢驗所 敬上

登全醫事檢驗所  
JY17060013  
醫檢師 劉燈煌