

登全醫事檢驗所通告

公告編碼：105004

公告日期：105 年 04 月 18 日

公告事項：FOBT 更換檢驗方法；Pro-GRP 停止操作

1. 本所已通過國民健康署 FOBT 檢驗方法變更一案，即日起將發放新型採便器，舊款採便器將不再發放；至 6/30 前仍接受舊款採便器檢體，請各單位以舊款採便器優先使用，避免混合使用。新檢驗方法之陽性切點值為 $\geq 100(\text{ng/mL})$ 。
2. 檢驗項目 ProGRP 因變更儀器無法操作，故自即日起停止操作收件。
3. 糞便潛血檢體採集：
 1. 糞便潛血免疫法檢體自採集步驟：
 - a. 若使用坐式馬桶，必免糞便掉入水中不易採取，請往前或反坐並在馬桶內斜面先鋪上衛生紙以利採集。或是使用乾淨瓶口大的容器先收集糞便。
 - b. 在廠商發的糞便潛血採集管(含緩衝液)上的標籤先寫上名字。
 - c. 採集管有兩端，轉開糞便採集管綠色旋蓋，取出螺旋採集棒。



- d. 使用螺旋採集棒在糞便的不同地方輕劃 6 次以上，少量的糞便覆蓋溝槽即可。
 - e. 將採集棒插回採集管，旋緊蓋子再用力搖盪混合。
 - f. 放入綠色塑膠袋。
 - g. 送實驗室，若無法當天送達，可以將採集管保存在較避光陰涼地方或冷藏一週內有效。
 - h. 請勿打開採集管前端之錐形蓋。
 - i. 若糞便太硬時，可加一點水弄濕，待糞便稍微軟化後再以採便棒插採。
 - j. 若有水便狀況，不易取樣時，請改日再取。
2. 不能接受在尿布的檢體。
 3. 有痔瘡出血及女性月經期間，請暫停採便。

檢體採取後立刻送檢，若不能立刻送檢，可置於 2-8°C 冰箱，隔天送檢。

謹此敬告

登全醫事檢驗所 敬上

登全醫事檢驗所
JY17060013
醫檢師 劉燈煌